



Contenido

1. Descripción de PROCER 4 AI	9
1.1. Especificaciones de PROCER 4 AI	9
1.2. Botones y puertos	9
1.3. Pantalla	10
1.4. Accesorios	10
1.4.1. Fuente de alimentación	10
1.4.2. Cable USB a USB-C	11
1.4.3. Adaptador <i>USB</i> a <i>USB-C</i>	11
1.4.4. Escáner portátil adaptado	11
1.4.5. Cámara externa	13
1.4.6. Anillos plásticos	13
1.5. Formatos compatibles	13
2. Funciones y manejo básico de PROCER 4 AI	14
2.1. Encender y apagar el dispositivo	14
2.2. Estado de suspensión	14
2.3. Manejo de la batería	14
2.4. Manejo básico	14
2.4.1. Descripción de botones	14
2.4.2. Opciones del Sistema	16
2.4.4. Responder preguntas/Confirmar acciones	16
2.4.5. Estructura de la Biblioteca/Almacenamiento interno	16
2.4.6. Formato procer	17
2.4.7. Formato procerlist	17
2.4.8. Escribir nombres	17
2.4.8.1. Escribir con el teclado externo	17
2.4.8.2. Escribir con los controles del PROCER 4 Al	17
2.4.9. Seleccionar carpeta de destino	17
2.4.10. Exportar	18
2.4.11. Atajos	18
2.4.12. Manejo del escáner portátil adaptado	18
3. El Menú Principal de PROCER 4 Al	20
3.1. Lista de funciones	20

3.2. Continuar lectura o procesamiento	20
3.3. Explorar Biblioteca	20
3.3.1. Navegación de la Biblioteca	21
3.3.2. Opciones disponibles - Biblioteca	21
3.4. Escáner	22
3.5. Importar archivos	22
3.5.1. Navegación - USB. Abrir archivos desde puerto USB	22
3.5.1.1. Opciones disponibles	22
3.5.2. Navegación - Google Drive®. Abrir archivos desde Google Drive®	23
3.5.2.1 Opciones Disponibles	23
3.5.3. Navegación - <i>Dropbox</i> ®. Abrir archivos desde <i>Dropbox</i> ®	23
3.5.2.1. Opciones disponibles	23
3.6. Cámara	24
3.6.1. Leer texto utilizando la cámara	24
3.6.2. Aistente PROCER	24
3.6.3. Lectura Inteligente	24
3.6.4. Descripción de imágenes	24
3.7. Editor de texto	24
3.7.1. Manejo del editor de texto	25
3.7.2 Dictado por voz	25
3.7.3. Opciones disponibles - Editor de texto	25
3.7.3.1. Guardar documento/Guardar documento como	25
3.7.3.2. Insertar página/Eliminar página	25
3.7.3.3 .Marcar/Desmarcar página	25
3.7.3.4. Ir a página o marcas	26
3.7.3.6. Activar/Desactivar conversión de símbolos dictados	26
3.7.3.7. Leer documento	26
3.7.3.8. Información	26
3.7.4. Abandonar editor de texto	26
3.8. Funciones de Inteligencia Artificial	26
3.9.1. Aistente PROCER	26
3.9.1.1 Opciones disponibles - Asistente PROCER	27
3.9.2 Lectura Inteligente	27
3.9.2.1 Opciones disponibles – Lectura Inteligente	27

	3.9.3. Descripción de imágenes	28
	3.9.4. Chat PROCER	28
	3.9.2.1. Opciones disponibles - Chat PROCER	28
	3.9.5. Traductor	28
	3.9.3.1. Opciones disponibles - Traductor	29
	3.9.6. Narraciones interactivas	29
	3.9.4.1. Opciones disponibles - Narraciones interactivas	30
	3.9.7. Herramientas de estudio	30
	3.9.7.1 Subí y accedé a documentos para estudiar	30
	3.9.7.2 Consultar al documento	31
	3.9.7.3 Crear autoevaluaciones	31
3.	10. Ajustes	31
	3.10.1. Configuración de voz e idioma	31
	3.11.2. Detalles de mensajes descriptivos	32
	3.11.3. Procesamiento OCR online	32
	3.11.4. Cambio automático de páginas	32
	3.11.5. Configurar redes <i>Wifi</i>	32
	3.11.5.1. Conectar a una red guardada	32
	3.11.5.2. Listar redes disponibles	32
	3.11.5.3. Conectar leyendo código <i>QR</i>	32
	3.11.5.4. Información	32
	3.11.5.5. Apagar/Encender <i>Wifi</i>	33
	3.11.6. Configurar usuario	33
	3.11.7. Configurar <i>Bluetooth</i>	33
	3.11.7.1. Listar mis dispositivos	33
	3.11.7.2. Buscar nuevos dispositivos	33
	3.11.7.3. Información	34
	3.11.7.4. Apagar/Encender adaptador <i>Bluetooth</i>	34
	3.11.8. Temporizador para suspender el dispositivo	34
	3.11.9. Temporizador para cámara externa	34
	3.11.10. Iniciar función automaticamente al conectar accesorio	34
	3.11.11. Función automática de la cámara externa	34
	3.11.12. Configurar atajos del Menú Principal	34
	3.11.13. Personalizar lista de funciones	34

	3.11.14. Reloj	34
	3.11.15. Almacenamiento utilizado	34
	3.11.16. Formatear Biblioteca	34
	3.11.17. Glosario de sonidos	35
	3.11.18. Borrar archivos de registro	35
	3.11.18.1. Lectura. Borrar registros de información de lectura	35
	3.11.18.2. Configuración. Borrar registros de información de configuración	35
	3.11.19. Actualizar	35
	3.11.19.1. Buscar actualización automáticamente	35
	3.11.19.2. Buscar actualización desde puerto <i>USB</i>	35
	3.11.20. Versión del software	35
	3.11.21. Enviar informe de errores al almacenamiento externo USB	35
4. I	Lectura completa de textos y archivos	36
	4.1. Navegación del texto durante la lectura	36
	4.1.1. Pausar/Continuar reproducción	36
	4.1.2. Avanzar/Retroceder oración	36
	4.1.3. Avanzar/Retroceder párrafo	36
	4.1.4. Cambiar página	36
	4.2. Iniciar/Finalizar/Leer resumen	36
	4.3. Opciones disponibles - Lectura de textos y archivos	37
	4.3.1. Guardar documento/Guardar resumen/Guardar al final de otro documento	37
	4.3.2. Ir a página o marcas	37
	4.3.3. Marcar/Desmarcar página	37
	4.3.4. Leer tablas	37
	4.3.5. Editar documento	38
	4.3.6. Exportar	38
	4.3.7. Información	38
	4.3.8. Insertar página desde escáner/cámara	38
	4.3.9. Borrar resumen	38
	4.3.10. Eliminar página	38
	4.4. Abandonar lectura	38
5. I	Lectura dinámica con cámara	40
	5.1. Navegación del texto durante la lectura dinámica	40
	5.1.1 Pausar/Continuar reproducción	40

9.1.1. Exportar página	48
9.1.2. Exportar documento	48
9.1.3. Invertir páginas	48
9.1.4. Combinar documento	48
9.1.5. Desmarcar todas las página	48
9.1.6. Borrar nombre a todas las páginas	48
9.1.8. Borrar registros para reanudar lectura	49
9.1.9. Eliminar página	49
Anexo I. Atajos del teclado externo	51
AI.1. Navegación	51
AI.2. Edición	51
AI.3. Funciones	51
Anexo II. Combinaciones de teclas - Editor de texto	53
AII.1. Navegación	53
AII.2. Edición	53
AII.3. Funciones	54
AII.4. Dictado por voz	55
AII.4.1. Conversión de símbolos	55
Anexo III. Usuario y aplicaciones	57
AIII.1. Iniciar Sesión con cuenta de PROCER	57
AIII.2. Sección Mis Dispositivos	58
AIII.3. Aplicaciones	59
AIII.3.1. Vincular cuenta con <i>Google Drive</i> ®	60
AIII 3.2 Vincular cuenta con <i>Dronbox</i> ®	61

MANUAL DE USUARIO PROCER 4 AI



1. Descripción de PROCER 4 AI

1.1. Especificaciones de PROCER 4 AI

En la siguiente tabla se indican las especificaciones del dispositivo PROCER 4 AI.

Especificaciones del dispositivo PROCER 4 AI	
Tamaño	7,9 cm. x 16,3 cm. x 1,6 cm.
Peso	208 g.
Autonomía	6 horas de uso continuo
Capacidad de almacenamiento de usuario	32 <i>GB</i>
Wifi	Disponible
Bluetooth	Disponible (auriculares, parlantes)

Nota. Ten en cuenta que la duración de la batería puede variar según las exigencias y condiciones de uso de **PROCER 4 AI**, así como la cantidad de conexiones a dispositivos *Bluetooth* y la conexión a la red *Wifi*.


Cuando el dispositivo entra en estado de suspensión, la autonomía aumenta considerablemente.

1.2. Botones y puertos

Mantenga el dispositivo en posición horizontal, con la **Cruz de navegación** a la izquierda y los botones principales a la derecha para un manejo fácil con los pulgares. Aproveche su diseño ergonómico, que facilita el agarre y el manejo.



1. Cara frontal del dispositivo.

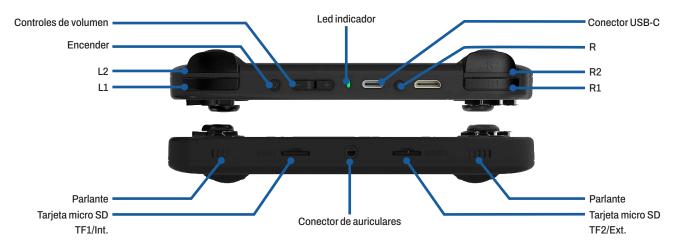

2. Bordes superior e inferior.

1.3. Pantalla

El dispositivo **PROCER 4 AI** trae una pantalla en su cara frontal. Úsela para seguir visualmente las operaciones del usuario, facilitar el entrenamiento en el manejo del dispositivo y ofrecer asistencia más efectiva a personas con discapacidad visual.

1.4. Accesorios

Nota. Algunos accesorios pueden venderse por separado y no estar incluidos.

1.4.1. Fuente de alimentación

Conecta la fuente de alimentación al puerto USB-C del dispositivo utilizando el cable USB a USB-C incluido con PROCER 4 AI.



3. Fuente de alimentación

1.4.2. Cable USB a USB-C

Utiliza este cable junto con la fuente de alimentación para cargar el dispositivo. Conecta el extremo *USB* a la fuente de alimentación y el extremo *USB-C* al dispositivo.



4. Cable USB a USB-C

1.4.3. Adaptador USB a USB-C

El adaptador *USB* a *USB-C* se utiliza para conectar *pendrives* o el escáner portátil adaptado.



1.4.4. Escáner portátil adaptado

Incluye una tarjeta micro *SD* de 16 *GB* o mayor capacidad y un cable mini *USB* o *USB-C* a *USB*. Requiere dos baterías *AA* para funcionar (no incluidas). Consulta los detalles de funcionamiento en la sección "2.4.12. Manejo del escáner portátil adaptado".

Especificaciones del escáner portátil adaptado	
Tamaño	25,7 cm. x 3 cm. x 2,45 cm.
Peso	150 g. sin baterías; 190 g. con baterías
Ancho del sensor	21 cm.
	Resolución alta (900 <i>DPI</i>) ≥ 10 seg.
Velocidad de escaneo	Resolución media (600 <i>DPI</i>) ≥ 8 seg.
	Resolución baja (300 <i>DPI</i>) ≥ 3 seg.
	Resolución alta (900 <i>DPI</i>) ~ 1200
Capacidad (en 8 GB)	Resolución media (600 <i>DPI</i>) ~ 1600
	Resolución baja (300 <i>DPI</i>) ~ 6000
Apagar automáticamente	3 minutos
Alimentación	2 baterías AA
Duración de las baterías	≥ 200 escaneos



6. Vista superior del escáner portátil adaptado



7. Vista lateral superior del escáner portátil adaptado

1.4.5. Cámara externa

Conectá la **Cámara externa** al puerto *USB-C* del dispositivo. Viene con cable incorporado y un adaptador micro *USB* a *USB-C* si es necesario para la conexión con **PROCER 4 AI**. Se puede montar en un lente o anillo (ver "1.4.6. Anillos plásticos").



8. Cámara externa

1.4.6. Anillos plásticos

Utiliza los anillos para montar la cámara externa en un dedo. Se incluyen al adquirir la cámara externa.



1.5. Formatos compatibles

PROCER 4 AI es capaz de procesar y reproducir los siguientes formatos de archivos:

Formatos compatibles	
Documentos	pdf, doc, docx, txt, rtf
Libros digitales	ePub, Daisy 2.02, Daisy 3, Daisy comprimido (zip)
Archivos de imagen	png, jpg, tiff
Audiolibros, audios y música	mp3, wma, wav, flac, m4a, mp4, ogg
Formatos propios	procer, procerlist



2. Funciones y manejo básico de PROCER 4 AI

2.1. Encender y apagar el dispositivo

Para encender **PROCER 4 AI**, mantén presionado el botón **Encender** durante dos segundos. Espera a que el dispositivo vocalice el mensaje de bienvenida.

Para apagar el dispositivo, ingresa a las **Opciones del Sistema** realizando una presión larga del botón **Encender**. Luego seleccioná la opción **Apagar el equipo** para confirmar el apagado (ver "2.4.4. Responder preguntas/Confirmar acciones").

Manteniendo presionado el botón **Encender** durante 7 segundos se puede forzar el apagado del dispositivo. **Realizar solo en caso de ser necesario**.

2.2. Estado de suspensión

PROCER 4 AI entra en estado de suspensión automáticamente si está encendido y no se utiliza durante 5, 10 o 30 minutos, según la preferencia del usuario (ver "3.11.8. Temporizador para suspender el dispositivo"). Esta función aumenta la duración y vida útil de la batería, con un sonido indicativo al entrar en estado de suspensión.

Para salir del estado de suspensión, presiona una vez el botón **Encender**. La salida del estado de suspensión se indica con un sonido.

2.3. Manejo de la batería

Conecta la fuente de alimentación al puerto *USB-C* de **PROCER 4 AI** para cargarlo. Presta atención a los diferentes sonidos que emite al conectar y desconectar la fuente de alimentación.

Si escuchas un sonido de ladrido, la batería está baja y necesitas cargar el dispositivo para evitar el apagado inminente.

Conoce el porcentaje de carga de la batería realizando una presión larga del botón SE.

Nota. Si el dispositivo está apagado y se conecta la fuente de alimentación, se encenderá automáticamente y se mantendrá encendido durante la carga.

2.4. Manejo básico

2.4.1. Descripción de botones

Los botones se encuentran distribuidos en el borde superior y en la cara frontal del dispositivo (ver "1.2. Botones y puertos", imágenes 1 y 2).

Borde superior, de izquierda a derecha:

- Botón L1 y L2. Con forma rectangular y bordes curvos, ubicados uno sobre el otro. Utiliza L1 principalmente durante la lectura o reproducción. Utiliza L2 principalmente para tomar fotografías y realizar consultas de voz. Consultá las secciones correspondientes para más detalles.
- Botón Encender. Con forma circular. Mantenelo presionado para acceder a las Opciones del Sistema en cualquier momento. Desde aquí puedes proceder a apagar el equipo, acceder a a configuraciones básicas. Se detalla en la sección Opciones del Sistema (ver "2.4.2. Opciones del Sistema").

- Controles de volumen. Botón doble, rectangular con bordes semicirculares. Presioná el extremo izquierdo para bajar el volumen y el derecho para aumentarlo.
- Botón R. Con forma circular. Reiniciá el dispositivo si no responde. Usalo antes de forzar el apagado.
- Botón R1 y R2. Con forma rectangular y bordes curvos. Están ubicados uno sobre otro. Utiliza R1 principalmente durante la lectura o reproducción. Utiliza R2 principalmente para tomar fotografías y realizar consultas de voz. Consultá las secciones específicas para más detalles.

Cara frontal, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha:

- Cruz de navegación. Compuesta por cuatro botones:
 - o **Botones Arriba y Abajo**. Navegá menús o desplazate por contenido. Consulta las secciones correspondientes para detalles específicos de su comportamiento.
 - o **Botones Izquierda y Derecha**. Consulta las secciones correspondientes para detalles específicos de su comportamiento.
- Botónes principales, con formas circularers, agrupados en forma de cruz:
 - o **Botón X**. Ubicado arriba del grupo. Consulta las secciones correspondientes para detalles específicos de su comportamiento.
 - o **Botón Y** (antes **Opciones**). Ubicado a la izquierda. Activa las opciones disponibles para la función actual de **PROCER 4 AI** (ver "2.4.3. Botón Y").
 - o **Botón B** (antes *Play*/Pausa). Ubicado abajo. Confirma acciones y activa funciones. Durante la reproducción o lectura, úsalo para pausar/reanudar. Consulta las secciones correspondientes para detalles específicos de su comportamiento.
 - o **Botón A** (antes **Salir**). Ubicado a la derecha. Usalo para retroceder al menú anterior, cancelar acciones o salir de una función.
- Botón M (antes Salir, presión larga). Con forma circular. Ubicado en el extremo inferior izquierdo. Regresa al Menú Principal sin preguntas ni confirmaciones, cancelando cualquier proceso actual.
- Botón SE (antes Información). Rectangular con bordes semicirculares. Ubicado en el extremo inferior derecho. Mantener presionado para conocer el nivel de la batería, la fecha, la hora y el estado de la conexión *Wifi*.
- Botón ST. Rectangular con bordes semicirculares. Ubicado en el extremo inferior derecho (al lado del botón SE). Mantener presionado para acceder a la configuración de redes *Wifi* desde la mayoría de los estados del dispositivo.

Los botones L3, R3, y los análogos L y R aún no tienen funciones asignadas, pero se activarán en futuras actualizaciones.

PROCER 4 AI, en su configuración por defecto, siempre indica al usuario qué botones se deben presionar para controlarlo.

Nota. Algunas funciones más específicas de los botones pueden modificarse en futuras actualizaciones según sugerencias y recomendaciones de los usuarios.



2.4.2. Opciones del Sistema

Accede a los **Opciones del Sistema** en cualquier momento realizando una presión larga del botón **Apagar/Opciones del Sistema**.

Utiliza los botones **Arriba** y **Abajo** para seleccionar el ajuste que desees modificar, y los botones **Izquierda** y **Derecha** para cambiar los valores. Utiliza el botón **B** para activar una función.

Los ajustes rápidos disponibles incluyen:

- Apagar el equipo. Utiliza esta opción para apagar el dispositivo.
- Reconectar *Bluetooth*. Intenta conectarse al último dispositivo *Bluetooth* vinculado.
- Volumen.
- Velocidad de voz.
- Idioma del sistema.
- Idioma de lectura.
- · Voz del sistema.
- Voz de lectura.
- Sincronizar dispositivo con Servidor. Actualiza los cambios realizados en ajustes, atajos y lista de funciones en el **Panel de Usuario** desde el sitio *web* de PROCER.

2.4.3. Botón Y

Presióna el botón Y para activar las opciones disponibles, las cuales varían según la función actual de PROCER 4 AI.

Utiliza los botones **Arriba**, **Abajo** o el mismo botón de **Y** para desplazarte entre las diferentes opciones.

Algunas opciones pueden contener subopciones relacionadas, indicadas con una señal auditiva. Accede a las subopciones con los botones **Izquierda** y **Derecha**.

Para confirmar y activar una opción, presiona el botón B.

2.4.4. Responder preguntas/Confirmar acciones

En algunas ocasiones, **PROCER 4 AI** te hará preguntas o solicitará confirmación para acciones como apagar el equipo, guardar un documento, borrar un archivo, o abandonar la lectura, entre otras. Utiliza los botones **Arriba** y **Abajo** para seleccionar entre las posibles respuestas. Confirma la respuesta seleccionada presionando el botón **B**.

2.4.5. Estructura de la Biblioteca/Almacenamiento interno

La **Biblioteca** de **PROCER 4 AI** te permite crear carpetas y subcarpetas para administrar tus archivos. El dispositivo solo lista y muestra archivos compatibles (ver "1.5. Formatos compatibles").

Existen carpetas especiales como AUDIOS y *DAISY*, las cuales no pueden modificarse ni borrarse. Puedes mover, renombrar y eliminar los archivos contenidos en estas carpetas (el propósito de estas carpetas se explica más adelante en la sección correspondiente).



2.4.6. Formato procer

El formato *procer* es ideal para guardar documentos de texto organizados en páginas, párrafos y oraciones, facilitando la lectura en nuestros dispositivos. El formato permite:

- Marcar/desmarcar páginas.
- · Crear un resumen por página.
- Recordar página, párrafo y oración donde se abandonó la lectura para su posterior reanudación.
- Nombrar páginas.

Todos los documentos guardados en la Biblioteca de PROCER 4 AI se almacenan en formato procer.

2.4.7. Formato procerlist

El formato *procerlist* es ideal para guardar listas de reproducción que simplifican la reproducción de audios en el dispositivo. Estas listas no contienen los audios, sino referencias a su ubicación.

El formato permite:

- Recordar audio y tiempo donde se abandonó la reproducción.
- Modificar posiciones de los audios dentro de la lista.
- Crear y navegar marcas de tiempo dentro de cada audio.

Todas las listas de reproducción guardadas en la Biblioteca de PROCER 4 AI se almacenan en formato procerlist.

2.4.8. Escribir nombres

Cuando necesites guardar un documento, escribir un nombre o ingresar una contraseña, se activará un teclado virtual. Este teclado funciona junto con un teclado físico *USB* o con los controles del **PROCER 4 AI**.

2.4.8.1. Escribir con teclado externo

Conectá el teclado al puerto USB-C y seguí las instrucciones del "Anexo I. Atajos del teclado externo".

2.4.8.2. Escribir con los controles del PROCER 4 AI

El dispositivo muestra en pantalla una representación visual del teclado *QWERTY* y del texto que estás escribiendo. Usá los botones **Arriba**, **Abajo**, **Izquierda** y **Derecha** para moverte por las letras, números o símbolos. Presioná el botón **B** para confirmar el carácter seleccionado. Escuchá la frase escrita hasta el momento cada vez que confirmás una letra.

Presioná los botones L1 o R1 para alternar entre minúsculas, mayúsculas y símbolos. Usá el botón L2 para borrar el último carácter ingresado y R2 para borrar toda la frase.

Una vez que hayas terminado, confirmá el texto con el botón X.

En algunos casos, el sistema sugerirá un nombre. Aceptalo o modificálo según lo necesites.

2.4.9. Seleccionar carpeta de destino

Cuando PROCER 4 AI te pida seleccionar una carpeta de destino para guardar un archivo, sigue estos pasos:



- Escucha las opciones disponibles, la primera siempre es la carpeta raíz (**Biblioteca**, para almacenamiento interno, **Mi** *Drive* o *Dropbox*®, para almacenamiento en la nube).
- Utiliza el botón B para abrir la carpeta seleccionada y explorar las subcarpetas.
- Recorre las carpetas con los botones Izquierda y Derecha.
- Cuando encuentres la carpeta deseada, presioná el botón X.
- Si necesitas retroceder, presiona el botón A para volver a la carpeta anterior
- Si estás en la carpeta raíz y deseas cancerlas la selección, presiona A.

2.4.10. Exportar

Exporta lo que estás leyendo, archivos *procer* y carpetas desde la **Biblioteca** a otros formatos como documentos de *Word*, *pdf* y audio. Se puede exportar a un medio de almacenamiento externo, a *Google Drive*®, *Dropbox*® o a la propia **Biblioteca**

Al activar la función de exportar, utiliza los botones **Arriba** y **Abajo** para seleccionar el destino al que deseas exportar el archivo o los archivos. Luego, elige la carpeta de destino del medio seleccionado (ver "2.4.9. Seleccionar carpeta de destino").

2.4.11. Atajos

Personaliza los botones **Izquierda**, **Derecha**, **B** y X para acceder rápidamente a funciones específicas de **PROCER 4 AI** desde el **Menú Principal**. También puedes configurar estos atajos desde el **Panel de Usuario** en el sitio *web*.

Las funciones disponibles para asignar a un botón son las siguientes:

- Continuar última lectura.
- Explorar Biblioteca.
- Leer última página (Escáner).
- Procesar múltiples páginas y leer (Escáner).
- USB. Abrir archivos desde puerto USB.
- Google Drive®. Abrir archivos desde Google Drive®.
- *Dropbox*® . Abrir archivos desde *Dropbox*®.
- Cámara externa. Leer utilizando la cámara externa.
- Editor de texto.
- Lectura inteligente.
- Descripción de imágenes.
- Chat PROCER.
- Traductor.
- · Narraciones interactivas.
- · Sin función.

2.4.12. Manejo del escáner portátil adaptado

Para capturar con el escáner portátil adaptado, enciende el escáner manteniendo presionado el botón circular en la parte superior durante aproximadamente 2 segundos hasta escuchar una señal auditiva. Una vez encendido, presiona nuevamente el mismo botón (presiona y suelta).

Comienza a deslizar el escáner sobre la hoja con el texto que deseas leer mientras escuchas la señal auditiva. Detén el despla-



zamiento por completo cuando la señal auditiva se detenga o presiona nuevamente el mismo botón del escáner para finalizar la captura.

El escáner puede desplazarse en cualquier dirección según la comodidad del usuario y la superficie a escanear. El ancho del sensor del escáner es del tamaño de una hoja A4.

3. El Menú Principal de PROCER 4 Al

El estado inicial de PROCER 4 AI es el Menú Principal.

Regresá al Menú Principal con el botón M desde cualquier estado o función (no esperes confirmación del dispositivo).

Al regresar al **Menú Principal** o al presionar **A** o **M** desde ahí, escucharás "Menú Principal".

3.1. Lista de funciones

Desde el **Menú Principal**, presiona los botones **Abajo** o **Arriba**, y accede a la lista de funciones. Utiliza el botón **Abajo** para avanzar y **Arriba** para retroceder en la lista de funciones. Escucharás las funciones al presionar los botones.

Confirma y activa una función seleccionada con el botón B.

Las funciones disponibles son:

- Continuar lectura o procesamiento.
- Explorar Biblioteca.
- Escáner.
- · Importar archivos.
- · Cámara.
- Editor de texto.
- Funciones de inteligencia artificial.
- · Ajustes.

Cambia el orden y activa/desactiva funciones según tus preferencias. Ajusta la lista desde los ajustes de **PROCER 4 AI** o el **Panel de usuario** en el sitio *web*.

Consulta "3.11.13. Personalizar lista de funciones" o "Anexo III. Usuario y aplicaciones".

3.2. Continuar lectura o procesamiento

Para retomar la lectura del último documento o procesamiento *OCR*, sigue estas instrucciones:

- Selecciona Continuar última lectura para reanudar la lectura del último documento reproducido desde donde lo dejaste anteriormente.
- Utiliza **Continuar procesamiento de múltiples páginas** para seguir con el último procesamiento *OCR* de varias páginas, incluso sin tener el escáner conectado.
- Elige **Continuar procesamiento de archivo** *pdf* para continuar con el procesamiento *OCR* del último *pdf* o *tiff* que hayas procesado.
- Si necesitas volver a procesar la última imagen obtenida, selecciona Volver a procesar última imagen obtenida.

3.3. Explorar Biblioteca

Accede a la Biblioteca de PROCER 4 Al para explorar archivos y carpetas (ver "2.4.5. Estructura de la Biblioteca/Almacena-

miento interno") con la función Explorar Biblioteca.

3.3.1. Navegación de la Biblioteca

Usa los botones **Abajo** y **Arriba** para recorrer los archivos compatibles con **PROCER 4 AI** dentro de la carpeta **Biblioteca**. Utiliza los botones **Izquierda** y **Derecha** para explorar las carpetas dentro de la carpeta actual.

Si encuentras un libro *Daisy*, escucharás un sonido diferente.

Presiona el botón **B** para procesar y reproducir un archivo seleccionado, o para abrir una carpeta y listar su contenido. Para regresar a la carpeta anterior, presiona el botón **A**.

Si no hay archivos o carpetas, escucharás un mensaje. Si intentas una acción imposible, se indicará con un tono de error. No olvides seleccionar un archivo o carpeta antes de presionar **B**.

3.3.2. Opciones disponibles - Biblioteca

Para acceder a las opciones disponibles dentro de la función **Explorar Biblioteca** presiona el botón **Y** para escuchar las opciones disponibles (ver "2.4.3. Botón Y").

Las opciones disponibles son:

- Filtro de archivos. Filtra los tipos de archivos disponibles. Utiliza los botones Izquierda y Derecha para seleccionar el tipo de archivo que deseas filtrar.
- Crear nueva carpeta. Crea una nueva carpeta dentro de la carpeta actual.
- Editar documento. Activa el editor de texto para modificar el documento con un teclado externo.
- Subir elemento a Google Drive®. Sube el elemento actual (archivo o carpeta) a tu cuenta de Google Drive® vinculada.
- Subir elemento a Dropbox®. Sube el elemento actual (archivo o carpeta) a tu cuenta de Dropbox® vinculada.
- Copiar elemento al almacenamiento externo *USB*. Copia el elemento actual (archivo o carpeta) al almacenamiento externo *USB*.
- Mover archivo a otra carpeta. Mueve el archivo seleccionado a otra carpeta de la Biblioteca.
- Cambiar nombre. Cambia el nombre del archivo o carpeta seleccionada.
- Manipular archivo. Modifica la estructura interna de un archivo procer (ver "9. Manipular archivos procer").
- Borrar elemento. Borra el archivo o carpeta seleccionada.
- Reproducir todos los archivos de audio de la carpeta. Disponible solo al seleccionar una carpeta. Reproduce todos los audios que contiene la carpeta seleccionada, excluyendo subcarpetas.
- Exportar carpeta. Disponible solo al seleccionar una carpeta. Contiene subopciones. Utiliza los botones **Izquierda** y **Derecha** para exportar todos los archivos *procer* de la carpeta a documentos de *Word* o archivos *pdf*.

Nota. Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de archivo seleccionado o si la selección corresponde a una carpeta.

Nota. Al subir un elemento a *Dropbox*®, si el nombre del elemento ya existe, se renombrará agregando un sufijo numérico al nombre original.

3.4. Escáner

Para utilizar el escáner portátil adaptado con **PROCER 4 AI** conecta el escáner al puerto *USB-C* de **PROCER 4 AI**. El dispositivo detectará automáticamente el escáner y accederá a la función **Escáner**.

Las siguientes funciones están disponibles:

- Leer última página. Obtiene la última imagen escaneada y comienza el procesamiento OCR y lectura de la imagen.
- **Procesar múltiples páginas y leer**. Obtiene todas las imágenes escaneadas y comienza el procesamiento *OCR* y lectura de todas las páginas. Antes de escanear múltiples páginas, se recomienda borrar todos los archivos del escáner.
- Borrar todos los archivos del escáner. Elimina todas las imágenes escaneadas almacenadas en el escáner.

Nota. Realiza el proceso de escaneo con el escáner desconectado del dispositivo y antes de activar alguna de las opciones mencionadas, asegúrate de que el escáner esté encendido y conectado a **PROCER 4 AI**. Una vez obtenidas las imágenes del escáner, puedes desconectarlo después de escuchar la señal auditiva correspondiente.

3.5. Importar archivos

Las siguientes opciones está disponibles para abrir y leer archivos desde medios externos, como un *pendrive* o almacenamiento en la nube:

- *USB*. Abrir archivos desde puerto *USB*. Permite navegar la estructura interna de un dispositivo de almacenamiento externo *USB* y abrir y leer los archivos compatibles con **PROCER 4 AI** (ver "3.5.1. Navegación *USB*. Abrir archivos desde puerto *USB*").
- Google Drive®. Abrir archivos desde Google Drive®. Permite navegar la estructura interna de una cuenta de Google Drive® vinculada, abrir y leer los archivos compatibles con PROCER 4 AI (ver "3.5.2. Navegación Google Drive®. Abrir archivos desde Google Drive®").
- *Dropbox*®. Abrir archivos desde *Dropbox*®. Permite navegar la estructura interna de una cuenta de *Dropbox*® vinculada, abrir y leer los archivos compatibles con **PROCER 4 AI** (ver "3.5.3. Navegación *Dropbox*®. Abrir archivos desde *Dropbox*®").

3.5.1. Navegación - USB. Abrir archivos desde puerto USB

El acceso al almacenamiento externo *USB* se gestiona de manera similar a la navegación en la **Biblioteca** (ver "3.3.1. Navegación de la Biblioteca"), con algunas variantes en las opciones.

3.5.1.1. Opciones disponibles

Al presionar el botón Y dentro de la función *USB*: Abrir archivos desde puerto *USB*, podrás escuchar las opciones disponibles (ver "2.4.3. Botón Y"). Las opciones son las siguientes:

- Filtro de archivos. Esta opción tiene subopciones. Usa los botones Izquierda y Derecha para seleccionar el tipo de archivos que deseas filtrar.
- Copiar elemento a Biblioteca. Copia el archivo o carpeta seleccionado a una carpeta en la Biblioteca de PROCER 4 AI.
- Reproducir todos los archivos de audio de la carpeta. Disponible solo cuando seleccionas una carpeta. Permite reproducir todos los audios que contiene la carpeta seleccionada, sin incluir subcarpetas.



Nota. Al copiar un elemento a la Biblioteca, si el nombre ya existe, se añadirá un sufijo (número) al nombre original del elemento.

3.5.2. Navegación - Google Drive®. Abrir archivos desde Google Drive®

La exploración del almacenamiento en *Google Drive*® sigue el mismo procedimiento que la navegación en la **Biblioteca** (ver "3.3.1. Navegación de la Biblioteca"), con algunas diferencias en las opciones disponibles.

Además, en *Google Drive*® puedes acceder a archivos y carpetas compartidas. Por defecto, se abre la carpeta **Mi** *Drive*. Para alternar entre **Mi** *Drive* y **Compartidos conmigo**, simplemente presiona el botón **X**.

3.5.2.1 Opciones Disponibles

Cuando estás dentro de la función *Google Drive*®. Abrir archivos desde *Google Drive*®, puedes acceder a varias opciones utilizando el botón de Y. Escucha las opciones disponibles a continuación (ver "2.4.3. Botón Y").

Las funciones disponibles son:

- Filtro de archivos. Filtra los archivos según tu preferencia. Utiliza los botones Izquierda y Derecha para seleccionar el tipo de archivos que deseas filtrar.
- Crear nueva carpeta. Crea una carpeta nueva dentro de la carpeta actual en Google Drive®.
- Cambiar nombre. Modifica el nombre del archivo o carpeta seleccionada.
- Mover archivo a otra carpeta. Transfiere el archivo seleccionado a otra carpeta en Mi Drive.
- Reproducir todos los archivos de audio de la carpeta. Reproduce todos los archivos de audio presentes en la carpeta seleccionada. Esta opción no incluye subcarpetas.
- Descargar elemento a la Biblioteca. Descarga el archivo o carpeta seleccionado a una carpeta en la Biblioteca de tu dispositivo PROCER 4 AI.
- Borrar elemento. Elimina el archivo o carpeta seleccionada.

Nota. Ten en cuenta que si descargas un elemento a la **Biblioteca** y ya existe un elemento con el mismo nombre, se añadirá un número al final del nombre original para diferenciarlos.

3.5.3. Navegación - *Dropbox*®. Abrir archivos desde *Dropbox*®

Para abrir archivos desde *Dropbox*®, la navegación del almacenamiento en *Dropbox*® se maneja de la misma forma que la navegación de la Biblioteca (ver "3.3.1. Navegación de la Biblioteca"), con la única diferencia de las opciones disponibles.

3.5.2.1. Opciones disponibles

Al presionar el botón de Y dentro de la función *Dropbox*®. Abrir archivos desde *Dropbox*®, podrás acceder a las siguientes opciones (ver "2.4.3. Botón Y").

Las funciones disponibles son:

- Filtro de archivos. Filtra los archivos según tu preferencia. Utiliza los botones Izquierda y Derecha para seleccionar el tipo de archivos que deseas filtrar.
- Crear nueva carpeta. Crea una carpeta nueva dentro de la carpeta actual en *Dropbox*®.
- Cambiar nombre. Modifica el nombre del archivo o carpeta seleccionada.

- Mover archivo a otra carpeta. Transfiere el archivo seleccionado a otra carpeta en *Dropbox*®.
- Reproducir todos los archivos de audio de la carpeta. Reproduce todos los archivos de audio presentes en la carpeta seleccionada. Esta opción no incluye subcarpetas.
- Descargar elemento a la Biblioteca. Descarga el archivo o carpeta seleccionado a una carpeta en la Biblioteca de tu dispositivo PROCER 4 AI.
- Borrar elemento. Elimina el archivo o carpeta seleccionada de *Dropbox*®.

Nota. Recuerda que si descargas un elemento a la **Biblioteca** y ya existe un elemento con el mismo nombre, se añadirá un número al final del nombre original para diferenciarlos.

3.6. Cámara

La función **Cámara** te permite acceder a las capacidades relacionadas con la cámara de **PROCER 4 AI**. Las opciones disponibles son:

3.6.1. Leer texto utilizando la cámara

Esta opción te permite tomar una fotografía utilizando una cámara conectada a **PROCER 4 AI** para su procesamiento *OCR* y lectura.

Activa la función y toma la foto presionando el botón L2 o R2. En la pantalla de PROCER 4 AI, podrás visualizar lo que la cámara está capturando.

PROCER 4 AI inicia una cuenta regresiva antes de tomar la fotografía (ver "3.11.9. Temporizador para cámara externa").

Si deseas cancelar la toma de la fotografía, simplemente presiona el botón A.

Nota. Ls opciones de la cámara solo estarán disponibles si la misma está conectada a PROCER 4 AI.

3.6.2. Aistente PROCER

Ver "3.9.1. Asitente PROCER".

3.6.3. Lectura Inteligente

Ver "3.9.2 Lectura Inteligente".

3.6.4. Descripción de imágenes

Ver "3.9.3. Descripción de imágenes".

3.7. Editor de texto

El **Editor de texto** de **PROCER 4 AI** te permite trabajar con un teclado tradicional *USB*, así como también con dictado por voz. Con esta herramienta, puedes crear nuevos documentos o editar contenido existente de manera sencilla.

Para crear un nuevo documento, accede al Editor de texto desde la lista de funciones (ver "3.1. Lista de funciones").

Para modificar un documento existente, accede al **Editor de texto** desde la **Biblioteca** (ver "3.3. Explorar Biblioteca") o durante la lectura (ver "4.3.5. Editar documento").

Una vez activado, puedes empezar a escribir o editar texto utilizando el teclado. Cada vez que ingreses texto o presiones una tecla, **PROCER 4 AI** lo vocalizará. Utiliza las combinaciones de teclas estándar, similares a las de otros lectores de pantalla conocidos (ver "Anexo III. Usuario y aplicaciones").

3.7.1. Manejo del editor de texto

El **Editor de texto** de **PROCER 4 AI** es fácil de controlar, ya sea mediante los botones del dispositivo o un teclado externo (para obtener más detalles sobre los atajos, funciones y controles, consulta el "Anexo II. Combinaciones de teclas - Editor de texto").

Presiona el botón R1 para pasar a la página siguiente, y el botón L1 para retroceder a la página anterior.

3.7.2 Dictado por voz

Para iniciar el dictado por voz, presiona el botón **L2** o **R2**. Cuando escuches la señal auditiva, comenzá a dictar tu texto. El texto se mostrará en la pantalla a medida que avanza el dictado.

Para finalizar el dictado por voz, presioná nuevamente L2 o R2.

El texto dictado se añade al final de la página actual. Asegurate de tener conectada la cámara, ya que es la que posee el micrófono.

3.7.3. Opciones disponibles - Editor de texto

Para escuchar las opciones disponibles para el **Editor de texto** de **PROCER 4 AI**, presiona el botón de **Y** (ver "2.4.3. Botón Y"). Las opciones disponibles son:

3.7.3.1. Guardar documento/Guardar documento como

- Selecciona **Guardar documento** para guardar el documento. Se te pedirá que elijas una carpeta de destino (ver "2.4.9. Seleccionar carpeta de destino"). Una vez seleccionada, elige un nombre para el documento (ver "2.4.8. Escribir nombres"). Luego de ingresado, el documento se guardará en la **Biblioteca**, en la carpeta seleccionada, con el nombre ingresado. Si el documento ya había sido guardado, se mantendrá el mismo nombre y ubicación.
- Si deseas guardar el documento con un nombre diferente, elige la opción **Guardar documento como**. Sigue los mismos pasos descritos anteriormente para seleccionar la carpeta de destino (ver "2.4.9. Seleccionar carpeta de destino") y escribir el nuevo nombre del documento (ver "2.4.8. Escribir nombres"). Una vez hecho esto, el documento se guardará en la **Biblioteca** con el nombre y ubicación especificados.

3.7.3.2. Insertar página/Eliminar página

- Insertar página. Esta opción agregará una nueva página vacía después de la página actual.
- Eliminar página. Esta opción eliminará la página actual del documento.

3.7.3.3 .Marcar/Desmarcar página

Esta opción compuesta por dos subopciones. Permite Marcar o desmarcar la página actual. Marcar páginas facilita la navegación desde el índice.

3.7.3.4. Ir a página o marcas

Accede a un índice para seleccionar una página para leer utilizando la opción **Ir a página o marcas**. Usa los botones **Arriba** y **Abajo** para listar todas las páginas, y los botones **Izquierda** y **Derecha** para listar las páginas marcadas.

3.7.3.5. Crear documento nuevo

Crea un nuevo documento vacío seleccionando esta opción. **PROCER 4 AI** te preguntará si deseas conservar los cambios del documento actual (ver "2.4.4. Responder preguntas/Confirmar acciones").

3.7.3.6. Activar/Desactivar conversión de símbolos dictados

Activa o desactiva la conversión de símbolos dictados utilizando esta opción. Los símbolos que se pueden dictar, están descritos en el "Anexo II. Combinaciones de teclas - Editor de texto".

3.7.3.7. Leer documento

Cambia a la lectura del documento (ver "4. Lectura completa de textos y archivos").

3.7.3.8. Información

Obtén información sobre el documento actual. Te proporcionará detalles como el nombre, la página actual y el total de páginas.

3.7.4. Abandonar editor de texto

Para abandonar el **Editor de texto**, presiona el botón **A**. **PROCER 4 AI** te pedirá confirmación para abandonar la lectura (ver "2.4.4. Responder preguntas/Confirmar acciones").

Presioná el botón M, volverás al Menú Principal sin necesidad de confirmación.

3.8. Funciones de Inteligencia Artificial

Para acceder a las funciones de Inteligencia Artificial, asegúrate de tener conexión a Internet y de estar vinculado a un usuario.

Las funciones son:

- Asistente PROCER.
- Lectura Inteligente.
- Descripción de imágenes.
- · Chat PROCER.
- Traductor.
- · Narraciones interactivas.
- Herramienas de estudio.

3.9.1. Aistente PROCER

Usá el **Asistente PROCER** para tomar una fotografía y hacer consultas sobre lo que aparece en la imagen.

Conectá la cámara. Si configuraste el Asistente PROCER como función automática al conectar la cámara, esta se activará de

inmediato. Si no, activá la función desde el Menú Principal presionando los botones L2 o R2.

Una vez activado el asistente, tomá una foto presionando L2 o R2. Luego, realizá una consulta por voz presionando nuevamente L2 o R2 para iniciar y finalizar la grabación.

Esperá unos segundos mientras el dispositivo procesa la imagen y la consulta. Escuchá la respuesta del **Asistente PROCER**. Usá el botón **B** para pausar o reanudar la lectura. Navegá por oraciones con los botones **Izquierda** y **Derecha**.

Desplazate entre consultas y respuestas usando los botones Arriba y Abajo.

Para salir del Asistente PROCER, presioná el botón A.

3.9.1.1 Opciones disponibles - Asistente PROCER

Presioná el botón Y para escuchar las opciones disponibles del **Asistente PROCER** (ver "2.4.3. Botón Y"). Las opciones disponibles son:

- Iniciar nueva consulta. Tomá una nueva fotografía para realizar nuevas consultas sobre esa imagen.
- Guardar documento. Guardá el contenido como un archivo en formato *procer* en la Biblioteca. Seleccioná una carpeta de destino (ver "2.4.9. Seleccionar carpeta de destino") y escribí un nombre para el archivo (ver "2.4.8. Escribir nombres"). Una vez que ingreses el nombre, el documento se guardará automáticamente en la carpeta seleccionada con ese nombre.

3.9.2 Lectura Inteligente

Usá la función **Lectura Inteligente** para tomar una fotografía y permitir que **PROCER 4 AI** identifique automáticamente el contenido y brinde la información más relevante según la imagen.

Una vez dentro de la función, tomá la fotografía presionando los botones **L2** o **R2**. Luego de procesar la imagen, el dispositivo iniciará la lectura del contenido identificado.

Según lo que se detecte en la imagen, el contenido puede estar dividido en distintas secciones:

- Texto. Leé el texto presente en la imagen.
- Dinero. Escuchá la información de billetes o monedas reconocidas.
- Factura de servicio. Obtené los datos más importantes como empresa, monto y vencimiento.
- Descripción. Escuchá una descripción general de la imagen (esta sección siempre está presente).

Usá el botón **B** para pausar o reanudar la lectura. Navegá entre oraciones con los botones **Izquierda** y **Derecha**, y movete entre secciones con los botones **Abajo** y **Arriba**.

3.9.2.1 Opciones disponibles – Lectura Inteligente

Presioná el botón Y para escuchar la opcione disponible para la función de Lectura Inteligente (ver "2.4.3. Botón Y").

Las opción disponible es:

• Guardar documento. Guardá el contenido como un archivo procer en la Biblioteca. Seleccioná una carpeta de destino (ver



"2.4.9. Seleccionar carpeta de destino") y escribí un nombre para el archivo (ver "2.4.8. Escribir nombres"). Una vez confirmado, el documento se guardará en la carpeta seleccionada con el nombre ingresado.

3.9.3. Descripción de imágenes

Para describir imágenes, asegúrate de tener la cámara externa conectada. Activa esta función para tomar una fotografía utilizando la cámara externa (ver "3.6.1. Leer texto utilizando la cámara"). Una vez capturada la imagen, se iniciará su procesamiento y luego la lectura de la descripción.

Durante la lectura de la descripción, puedes utilizar los botones **Izquierda** y **Derecha** para retroceder y avanzar por las oraciones. Utiliza el botón **B** para pausar y reanudar la descripción.

Para salir de esta función, presiona el botón A.

3.9.4. Chat PROCER

La función *Chat* PROCER en un *chat* de propósito general donde puedes realizar todo tipo de consultas. Puedes ingresar el texto o la consulta de dos maneras: con teclado externo o mediante dictado por voz.

- Realizar consulta con teclado externo. Conecta un teclado al puerto *USB-C* de **PROCER 4 AI**. Luego, escribe la consulta con el teclado y presiona **Enter** para procesarla.
- Realizar consulta con dictado por voz. Presiona el botón L2 o R2 para activar el micrófono del dispositivo. Una vez que hayas formulado la consulta, vuelve a presionar L2 o R2 para procesarla.

Una vez que **PROCER 4 AI** procesa la consulta, lee la respuesta obtenida. Puedes pausar y reanudar la lectura con el botón **B**. Usa los botones **Izquierda** y **Derecha** para retroceder y avanzar por oraciones, respectivamente.

Las consultas y respuestas se acumulan, así que puedes avanzar y retroceder entre ellas con los botones **Abajo** y **Arriba**, respectivamente.

Para salir del *Chat* PROCER, simplemente presiona el botón A.

3.9.2.1. Opciones disponibles - Chat PROCER

Presiona el botón de **Opciones** para escuchar las opciones disponibles para el *Chat* **PROCER** (ver "2.4.3. Botón Y"). Las opciones disponibles son:

- Iniciar un nuevo chat.
- Exportar chat a Word.
- Exportar chat a pdf.
- Exportar chat a audio.
- Exportar *chat* a formato *procer*.

3.9.5. Traductor

La función **Traductor** permite traducir del español al inglés o del inglés al español. Puedes realizar consultas de dos maneras: con un teclado externo o dictando por voz.

- Para realizar una consulta con un teclado externo, conecta un teclado al puerto *USB-C* de **PROCER 4 AI** y escribe tu consulta. Luego, presiona B para procesarla.
- Para realizar una consulta con dictado por voz, presiona el botón L2 o R2 para activar el micrófono del dispositivo y realiza tu consulta. Después de hacerla, vuelve a presionar el botón L2 o R2 para procesarla.

Para configurar la traducción, presiona el botón X.

Una vez procesada la consulta, **PROCER 4 AI** leerá la respuesta. Usa el botón **B** para pausar y reanudar la lectura, y los botones **Izquierda** y **Derecha** para retroceder y avanzar por las oraciones, respectivamente.

Las consultas y respuestas se acumulan, así que puedes avanzar y retroceder entre ellas con los botones Abajo y Arriba.

Para salir del Traductor, presiona el botón A.

3.9.3.1. Opciones disponibles - Traductor

Presiona el botón de Y para escuchar las opciones disponibles para el **Traductor** de **PROCER 4 AI** (ver "2.4.3. Botón Y"). Las opciones disponibles son:

- Exportar chat a Word.
- Exportar chat a pdf.
- Exportar chat a audio.
- Exportar chat a formato procer.

3.9.6. Narraciones interactivas

La función Narraciones interactivas permite crear historias, narraciones, cuentos donde el usuario decide como se desarrolla.

Configura los parámetros antes de iniciar la narración con los botones **Abajo** y **Arriba**, y ajústalos con los botones **Izquierda** y **Derecha**.

Los parámetros configurables son:

- Especie del protagonista. Humano, Animal o Fantasía.
- Tipo de narración. Novela, Mito, Epopeya, Fábula, Leyenda, Cuento o Relato.
- Género de la narración. Policial, Distópica, Ciencia ficción, Sensual, Suspenso, Terror, Filosófica, Aventura, Romántica o drama.
- Género del protagonista. Femenino, Masculino o Indefinido
- Nombre del protagonista. Presiona B para escribir el nombre.

Inicia la narración realizando una presión el botón X.

Durante la narración, al final se te presentarán tres opciones para decidir cómo continuarla. Selecciona una opción con los botones **L1** y **R1** y confirma la seleción con el botón **B**. La narración continuará según la opción que elijas. A medida que avanza la narración, aumenta la probabilidad de que finalice al seleccionar una opción. Durante la reproducción, puedes desplazarte por los segmentos de la narración con los botones **Abajo** y **Arriba**.

Finaliza la narración actual e inicia una nueva accediendo a las opciones.

3.9.4.1. Opciones disponibles - Narraciones interactivas

Presiona el botón de Y para escuchar las opciones disponibles para las **Narraciones Interactivas** de **PROCER 4 AI** (ver "2.4.3. Botón Y"). Las opciones disponibles son:

- Iniciar historia. Equivalente a realizar una presión larga del botón B.
- Exportar historia a Word.
- Exportar historia a pdf.
- Exportar historia a audio.
- Exportar historia a formato procer.

3.9.7. Herramientas de estudio

Usá las herramientas de estudio para realizar consultas o generar autoevaluaciones basadas en un documento específico. El dispositivo responderá únicamente con la información contenida en ese documento.

Antes de utilizar estas funciones, subí el documento que quieras estudiar al servidor para su procesamiento. Una vez que el documento esté procesado, accedé a las herramientas desde el menú correspondiente.

3.9.7.1 Subí y accedé a documentos para estudiar

Antes de utilizar las herramientas de estudio, subí el documento que querés procesar. Los formatos compatibles son: *procer*, *epub*, *doc*, *docx*, *rtf*, *txt*, *pdf*,

Podés subir documentos de cualquier formato compatible desde la lectura. Para hacerlo, accedé a la opción **Estudiar** desde el menú de opciones de lectura.

También podés subir archivos en formato *procer* desde la **Biblioteca**, accediendo a la opción **Estudiar** en el menú de opciones del documento.

Cada vez que subas un archivo, **PROCER 4 AI** verificará si ya lo procesaste anteriormente. Si el documento ya fue procesado, accederás directamente a las herramientas de estudio. Si no, el dispositivo iniciará el procesamiento, lo cual puede tardar desde unos segundos hasta algunos minutos, dependiendo del tamaño del archivo. Esta acción solo es necesaria la primera vez.

Una vez procesado, accedé a las herramientas de estudio de cualquiera de estas tres maneras:

- Desde la lectura, accediendo a **Estudiar** desde las opciones de lectura.
- Desde la Biblioteca, accediendo a Estudiar desde las opciones del documento.
- Desde el menú Funciones de Inteligencia Artificial, seleccionando Herramientas de Estudio.

Cuando ingreses desde el menú de Inteligencia Artificial, el dispositivo mostrará una lista con todos los documentos disponibles para estudiar. Usá los botones **Abajo** y **Arriba** para recorrer la lista, el botón **B** para seleccionar un documento y acceder a sus herramientas, y el botón **Y** para abrir las opciones disponibles. Si querés eliminar un documento de la lista, hacelo desde ese mismo menú de opciones.



Una vez que selecciones un documento, usá los botones **Abajo** y **Arriba** para elegir entre las herramientas disponibles y el botón **B** para acceder.

3.9.7.2 Consultar al documento

Realizá cualquier tipo de consulta sobre el documento seleccionado.

Para iniciar una nueva consulta, escribí tu pregunta con el teclado físico o dictala por voz (requiere tener conectada la cámara externa). Una vez procesada la consulta, **PROCER 4 AI** reproducirá la respuesta de manera automática.

Usá el botón **B** para pausar o reanudar la lectura. Navegá por oraciones con los botones **Izquierda** y **Derecha**. Dictá o escribí una nueva consulta para obtener otra respuesta. Todas las consultas y respuestas se guardan en el historial.

Movete entre consultas y respuestas anteriores con los botones Abajo y Arriba.

3.9.7.3 Crear autoevaluaciones

Generá autoevaluaciones basadas en el contenido del documento seleccionado.

Para comenzar, escribí el tema de la autoevaluación con el teclado físico o dictalo por voz. Una vez procesada, **PROCER 4 AI** comenzará la lectura de la primera pregunta.

Cada autoevaluación incluye cinco preguntas, con tres opciones posibles. Solo una opción es correcta.

Durante la lectura de una pregunta, usá el botón **B** para pausar o reanudar, y los botones **Izquierda** y **Derecha** para avanzar o retroceder por las oraciones.

Usá los botones Abajo y Arriba para recorrer las respuestas. Seleccioná la opción que consideres correcta con el botón B.

Movete entre preguntas con los botones L1 y R1.

Presioná el botón Y para acceder a las siguientes opciones:

- Calificar. Escuchá tu resultado final y conocé cuál era la respuesta correcta para cada pregunta.
- Crear nueva autoevaluación. Escribí o dictá un nuevo tema para generar una nueva evaluación.

3.10. Ajustes

Permite configurar el dispositivo **PROCER 4 AI**. Utiliza los botones **Abajo** y **Arriba** para navegar por los ajustes disponibles. El botón **B** activa el ajuste seleccionado, mientras que **Izquierda** y **Derecha** te permiten modificar el ajuste actual. Estos son los ajustes disponibles:

3.10.1. Configuración de voz e idioma

Permite configurar el idioma y las voces del dispositivo **PROCER 4 AI**. Usa los botones **Abajo** y **Arriba** para navegar por las opciones de idioma y voz. Con los botones **Izquierda** y **Derecha**, puedes modificar la opción actual. Las opciones disponibles son:

- Idioma del sistema. Español/Inglés. Cambia el idioma de las instrucciones y de los menús.
- Idioma de lectura. Español/Inglés. Cambia el idioma de la lectura.

- Voz del sistema. Español (Alba/Francisco), Inglés (Julie/James). Cambia la voz de las instrucciones y de los menús.
- Voz de lectura. Español (Alba/Francisco), Inglés (Julie/James). Cambia la voz de la lectura

Nota. Al modificar el idioma del sistema o de lectura, también se cambiarán automáticamente la voz del sistema y de lectura.

3.11.2. Detalles de mensajes descriptivos

Selecciona entre Simple o Completo usando los botones Izquierda y Derecha. Por defecto, está seleccionado Completo. Si eliges Simple, PROCER 4 AI dará mensajes con menos detalles al acceder a las distintas funciones. No recomendamos seleccionar la opción Simple hasta que estés familiarizado con el uso del dispositivo.

3.11.3. Procesamiento OCR online

Elige entre Utilizar *OCR online* si está disponible o No utilizar *OCR online* con los botones Izquierda y Derecha. Por defecto, está seleccionado Utilizar *OCR online* si está disponible para que utilice el servicio cuando esté disponible. Si seleccionas No utilizar *OCR online*, PROCER 4 AI siempre utilizará el procesamiento *OCR* local del dispositivo.

3.11.4. Cambio automático de páginas

Elige entre **Activado** o **Desactivado** usando los botones **Izquierda** y **Derecha**. Por defecto, está seleccionado **Activado**. Si prefieres **Desactivado**, la página no cambiará automáticamente al llegar al final durante la lectura.

3.11.5. Configurar redes Wifi

Conecta el dispositivo a una red *Wifi*. Utiliza los botones **Abajo** y **Arriba** para navegar por las opciones disponibles. Las funciones disponibles son:

3.11.5.1. Conectar a una red guardada

Crea una lista de redes previamente conectadas por el dispositivo **PROCER 4 AI**. Usa los botones **Abajo** y **Arriba** para seleccionar una red guardada y conéctate presionando el botón **B**. Al presionar el botón **Y**, accede a las opciones disponibles para las redes guardadas, que son:

- Información. Proporciona detalles sobre la conexión de la red actual de PROCER 4 AI.
- Borrar red. Elimina una red previamente conectada por PROCER 4 AI.

3.11.5.2. Listar redes disponibles

Realiza un escaneo de las redes disponibles. Después del escaneo, navega por las redes disponibles usando los botones **Abajo** y **Arriba** y conéctate presionando el botón **B**. Al conectar con una nueva red, ingresa su contraseña según sea necesario (ver "2.4.8. Escribir nombres").

3.11.5.3. Conectar leyendo código QR

Conéctate a una red Wifi escaneando su código QR con la cámara externa.

3.11.5.4. Información

Proporciona detalles sobre la conexión de la red actual de PROCER 4 AI.



3.11.5.5. Apagar/Encender Wifi

Activa o desactiva el adaptador Wifi.

3.11.6. Configurar usuario

Esta opción permite asociar el dispositivo PROCER 4 Al a una cuenta de usuario de PROCER.

Usa los botones **Abajo** y **Arriba** para desplazarte por las opciones disponibles, que son:

- Vincular dispositivo a una cuenta de PROCER. Permite asociar el dispositivo a una cuenta de PROCER. Activa esta opción e ingresa tu nombre de usuario y contraseña de PROCER (ver "2.4.8. Escribir nombres"). Si la vinculación es exitosa, recibirás un saludo verbal con tu nombre.
- Desvincular dispositivo de cuenta de PROCER. Elimina la asociación del dispositivo PROCER 4 AI con una cuenta de usuario.
- Información. Proporciona detalles sobre la cuenta a la que el dispositivo PROCER 4 AI está actualmente vinculado.

Nota. Para asociar un dispositivo a una cuenta de PROCER, se requiere una conexión activa a *Internet*. La vinculación con una cuenta de usuario es necesaria para acceder a algunas funciones y características del dispositivo **PROCER 4 AI**.

3.11.7. Configurar Bluetooth

Permite conectar dispositivos externos a PROCER 4 AI, como altavoces o auriculares.

PROCER 4 AI recuerda los dispositivos previamente conectados. Cuando se enciende, se sale del modo de suspensión o se accede a la opción Configurar *Bluetooth*, PROCER 4 AI intentará conectarse automáticamente al último dispositivo emparejado con éxito.

Nota. PROCER 4 Al solo puede estar conectado a un dispositivo *Bluetooth* a la vez. Asegúrate de que no haya otra conexión activa antes de conectar un nuevo dispositivo.

Puedes navegar por las funciones disponibles usando los botones Abajo y Arriba. Las funciones disponibles son:

3.11.7.1. Listar mis dispositivos

Genera una lista de dispositivos recordados por conexiones anteriores. Usa los botones **Abajo** y **Arriba** para elegir un dispositivo y el botón **B** para conectar con el seleccionado. Al presionar el botón **Y**, accede a las siguientes opciones:

- Olvidar dispositivo. Elimina el dispositivo seleccionado de la lista de memorizados.
- Desconectar dispositivo. Desconecta el dispositivo seleccionado de PROCER 4 AI.

3.11.7.2. Buscar nuevos dispositivos

Realiza un escaneo en busca de dispositivos disponibles. Después de completar el escaneo, **PROCER 4 AI** compila una lista de dispositivos encontrados. Utiliza los botones **Abajo** y **Arriba** para seleccionar un dispositivo y el botón **B** para conectarte.

Al presionar el botón Y, accedes a la opción de Volver a buscar dispositivos, que vuelve a realizar el escaneo de dispositivos disponibles y actualiza la lista.



3.11.7.3. Información

Proporciona detalles sobre el dispositivo conectado a PROCER 4 AI.

3.11.7.4. Apagar/Encender adaptador *Bluetooth*

Activa o desactiva el adaptador Bluetooth.

3.11.8. Temporizador para suspender el dispositivo

Elige entre 5, 10 y 30 minutos para el tiempo de suspensión con los botones Izquierda y Derecha. Este valor determina cuándo PROCER 4 AI entra en modo de suspensión.

3.11.9. Temporizador para cámara externa

Selecciona entre 0, 3, 5 y 10 segundos usando los botones Izquierda y Derecha. Estos segundos determinan el tiempo de cuenta regresiva antes de tomar una fotografía con la cámara externa.

3.11.10. Iniciar función automaticamente al conectar accesorio

Activá o desactivá el inicio automático de una función específica al conectar la cámara externa o el escáner portátil adaptado desde el **Menú Principal**.

3.11.11. Función automática de la cámara externa

Elegí qué función se inicia automáticamente al conectar la cámara externa.

3.11.12. Configurar atajos del Menú Principal

Personaliza atajos asignando funciones a botones específicos. Selecciona el botón con los botones **Abajo** y **Arriba**, luego elige la función con los botones **Izquierda** y **Derecha**. Confirma con el botón **B**.

3.11.13. Personalizar lista de funciones

Cambia el orden y activa/desactiva funciones del **Menú Principal**. Selecciona una función con los botones **Abajo** y **Arriba**, y activa o desactiva con los botones **Izquierda** y **Derecha**.

El botón **B** permite, utilizando las teclas **Abajo** y **Arriba**, elegir la posición en la función aparece en la lista. Presiona nuevamente el botón **B** para confirmar la ubicación.

3.11.14. Reloj

Configura el reloj manualmente si no hay conexión a *Internet*. Usa los botones **Abajo** y **Arriba** para seleccionar y los botones **Izquierda** y **Derecha** para ajustar año, mes, día, hora y minuto.

3.11.15. Almacenamiento utilizado

Obtén el porcentaje de almacenamiento utilizado, el espacio total utilizado y el espacio disponible (en Megabytes).

3.11.16. Formatear Biblioteca

Formatea el almacenamiento interno (Biblioteca) del dispositivo. Ten en cuenta que esta operación no se puede deshacer



3.11.17. Glosario de sonidos

Recorré la lista de sonidos con los botones Abajo y Arriba. Presioná el botón B para escuchar la descripción.

3.11.18. Borrar archivos de registro

Elige entre Borrar registros de información de lectura o Configuración con los botones Izquierda y Derecha. Selecciona y confirma con el botón B.

3.11.18.1. Lectura. Borrar registros de información de lectura

Elimina la información almacenada para retomar las posiciones de lectura, la última lectura realizada y la información para continuar procesamientos de múltiples páginas o archivos *pdf*.

3.11.18.2. Configuración. Borrar registros de información de configuración

Elimina información de algunas configuraciones del dispositivo.

3.11.19. Actualizar

Aplica actualizaciones de *software* a **PROCER 4 AI**. Elige entre **Buscar actualización automáticamente** o **Buscar actualización desde puerto USB** con los botones **Abajo** y **Arriba**.

3.11.19.1. Buscar actualización automáticamente

Conecta a *Internet* y busca automáticamente las actualizaciones disponibles. Selecciona la actualización a instalar con los botones **Abajo** y **Arriba** y confirma con el botón **B**.

El dispositivo **PROCER 4 AI** debe estar vinculado a una cuenta de usuario.

3.11.19.2. Buscar actualización desde puerto USB

Descarga el archivo de actualización a un medio externo de almacenamiento, como un *pendrive*. Al activar esta opción, el dispositivo te permite navegar por el almacenamiento externo (ver "3.5.1. Navegación - *USB*. Abrir archivos desde puerto *USB*"), donde se listarán los archivos de actualización disponibles. Una vez seleccionado el archivo de actualización, procede a la instalación con el botón **B**.

Nota. Conecta la fuente de alimentación al dispositivo **PROCER 4 AI** para avanzar con la actualización. El proceso puede demorar varios minutos, durante los cuales no podrás utilizar el dispositivo **PROCER 4 AI**. Al finalizar, recibirás un mensaje verbalizando la finalización. Si la actualización se instala correctamente, el dispositivo se reiniciará automáticamente.

3.11.20. Versión del software

Vocaliza la versión del software instalada en el dispositivo.

3.11.21. Enviar informe de errores al almacenamiento externo USB

Copia el archivo de informe de errores a un dispositivo de almacenamiento USB.

4. Lectura completa de textos y archivos

Lee textos y archivos completos con el dispositivo **PROCER 4 AI**. Accede al estado de lectura abriendo archivos compatibles desde la **Biblioteca**, un medio de almacenamiento externo, la nube, al capturar imágenes con el escáner portátil adaptado, la cámara o alguna de las funciones de Inteligencia Artificial.

Dependiendo del medio, el tiempo de espera para comenzar la lectura puede variar. Una vez que el dispositivo **PROCER 4 AI** esté leyendo, se habilitan varias alternativas de navegación, herramientas y opciones. Estas características se detallan a continuación:

4.1. Navegación del texto durante la lectura

4.1.1. Pausar/Continuar reproducción

Presiona el botón **B** para poner en pausa o reanudar la reproducción.

4.1.2. Avanzar/Retroceder oración

Cuando presionas el botón **Derecha**, la reproducción avanza a la siguiente oración. Si no hay más oraciones, el dispositivo te lo indicará mediante una señal auditiva.

Cuando presionas el botón **Izquierda**, la reproducción retrocede a la oración anterior. Si estás leyendo la primer oración y tratas de retroceder a la anterior, el dispositivo repetirá la primera oración.

4.1.3. Avanzar/Retroceder párrafo

Cuando presionas el botón **Abajo**, la reproducción avanza al siguiente párrafo. Si no hay más párrafos, el dispositivo te lo indicará mediante una señal auditiva.

Cuando presionas el botón **Arriba**, la reproducción retrocede al párrafo anterior. Sin embargo, si estás leyendo el primer párrafo y tratas de retroceder al anterior, el dispositivo repetirá el primer párrafo nuevamente.

4.1.4. Cambiar página

Si deseas ir a la página siguiente, presioná el botón **R1**. Si ya estás en la última página, se iniciará la lectura desde la primera página nuevamente.

Para retroceder a la página anterior, presioná el botón L1. Si no hay una página anterior, comenzará la lectura desde la última página.

Cada vez que cambies de página, se informará sobre el número de la página que se está por leer.

Recuerda que el número de página proporcionado por PROCER 4 Al puede ser diferente al del documento original.

4.2. Iniciar/Finalizar/Leer resumen

Con el dispositivo **PROCER 4 AI**, construir resúmenes del texto que estás escuchando es fácil. Cuando escuches algo que quieras resumir, simplemente presiona el botón **X**. El resumen comenzará desde el inicio de la oración en la que presionaste el botón. Para finalizar el resumen, presiona nuevamente el botón **X**. El resumen se extenderá hasta el final de la oración, incluyendo oraciones intermedias si las hubiera.



Cada vez que presiones el botón **X**, escucharás una señal auditiva diferente que indicará cuándo se abre y se cierra el resumen. Puedes incluir tantas secciones de texto como desees.

Cuando avances por oración o párrafo y tengas un resumen abierto, cada oración que saltees se incluirá en el resumen. Si retrocedes por oración o párrafo mientras tienes un resumen abierto, se cancelará el resumen y se descartarán las últimas oraciones incluidas.

Puedes alternar entre el resumen y el texto original manteniendo presionado el botón **X**. El dispositivo te dirá si está leyendo el texto resumido ("Resumen") o el original ("Texto completo"). Si no hay ningún resumen, se indicará con una señal auditiva.

4.3. Opciones disponibles - Lectura de textos y archivos

Presiona el botón **Y** durante la lectura para acceder a las opciones disponibles (ver "2.4.3. Botón Y"). En las siguientes secciones se detallan las opciones disponibles para la lectura.

4.3.1. Guardar documento/Guardar resumen/Guardar al final de otro documento

Escucha las opciones de guardado al acceder a las opciones de lectura (ver "2.4.3. Botón Y"). Estas opciones se componen de tres subopciones que se detallan a continuación:

- Guardar documento. Guarda el documento como un archivo *procer* en la Biblioteca. Activa esta opción y selecciona una carpeta de destino (ver "2.4.9. Seleccionar carpeta de destino"). Luego escribe el nombre del documento (ver "2.4.8. Escribir nombres"). Una vez que ingreses un nombre, el documento se guardará en la Biblioteca, en la carpeta seleccionada y con el nombre que ingresaste.
- Guardar resumen. Guarda solo el resumen del documento actual como un archivo *procer* en la Biblioteca. El procedimiento es el mismo que para guardar un documento.
- Guardar al final de otro documento. Anexa el documento actual al final de otro archivo *procer* en la Biblioteca. Elige esta opción y selecciona un archivo *procer* para anexar el documento actual.

4.3.2. Ir a página o marcas

Accede a un índice para seleccionar una página para leer utilizando la opción **Ir a página o marcas**. Utiliza los botones **Abajo** y **Arriba** para listar todas las páginas, y los botones **Izquierda** y **Derecha** para listar las páginas marcadas. También puedes hacer lo siguiente utilizando el botón **Y**:

- Marcar página, Desmarcar página o Desmarcar todas las páginas.
- Seleccionar página con teclado.
- Renombrar página, Borrar nombre o Borrar nombre a todas las páginas.

4.3.3. Marcar/Desmarcar página

Marca o desmarca la página actual para facilitar su navegación desde el índice.

4.3.4. Leer tablas

Esta función te permite leer tablas detectadas al utilizar el escáner, las cámaras, archivos de imagen o al procesar archivos *pdf*. También puedes acceder a las tablas si has guardado el contenido de la lectura en el formato *procer*. Recuerda que para utilizar

esta función, es necesario que el procesamiento *OCR* en línea esté activado y que el dispositivo esté vinculado a un usuario. Para obtener más detalles sobre cómo leer y navegar por las tablas, consulta la sección "6. Leer tablas".

4.3.5. Editar documento

Activa el editor de texto para modificar el documento que se está leyendo actualmente.

4.3.6. Exportar

Las opciones de exportar están compuestas por siete sub opciones que se detallan a continuación:

- Exportar página a documento de *Word*. Exporta la página actual en un documento de *Word*.
- Exportar página a *pdf*. Exporta la página actual a un archivo *pdf*.
- Exportar página a audio. Exporta la página actual a un archivo de audio wav.
- Exportar documento a Word. Exporta el documento actual (todas las páginas) a un documento de Word.
- Exportar documento a pdf. Exporta el documento actual (todas las páginas) a un archivo pdf.
- Exportar documento a audio. Exporta el documento actual (todas las páginas) a archivos de audio *wav*. Este proceso puede tardar mucho tiempo, dependiendo de la cantidad de páginas del documento. Puede cancelarse si el usuario lo desea.

Nota. Al realizar acciones de exportación, se le informa al usuario el nombre con el que se exportó el archivo.

4.3.7. Información

Proporciona detalles sobre el documento actual, incluyendo el nombre, la página actual y el total de páginas.

4.3.8. Insertar página desde escáner/cámara

Las opciones de insertar página están compuestas por dos sub opciones, que son:

- Insertar página desde escáner. Permite agregar una página al documento actual utilizando la última página obtenida por el escáner portátil adaptado.
- Insertar página desde cámara. Permite agregar una página al documento actual tomando una fotografía con la cámara.

4.3.9. Borrar resumen

Elimina el resumen de la página actual.

4.3.10. Eliminar página

Elimina la página actual del documento actual.

4.4. Abandonar lectura

Si presionas el botón **A** durante la lectura, **PROCER 4 AI** te pedirá confirmación para abandonarla (ver "2.4.5. Estructura de la Biblioteca/Almacenamiento interno").



Presioná del botón \mathbf{M} , para volver al $\mathbf{Menú}$ Principal sin solicitar confirmación.

5. Lectura dinámica con cámara

Al leer utilizando la cámara (ver "3.6. Cámara"), se activa el modo de lectura dinámico. Si decides guardar el documento, la lectura dinámica finaliza y se activa la lectura completa (ver "4. Lectura completa de textos y archivos").

5.1. Navegación del texto durante la lectura dinámica

5.1.1. Pausar/Continuar reproducción

Una presión del botón **B** pone en pausa la reproducción o la reanuda si ya estaba pausada.

5.1.2. Avanzar/Retroceder oración

Al presionar el botón **Derecha**, la reproducción avanza a la siguiente oración. Si no hay más oraciones, se indica al usuario mediante una señal auditiva.

Al presionar el botón **Izquierda**, la reproducción retrocede a la oración anterior. Si estás leyendo la primera oración e intentas retroceder, se repite la primera oración nuevamente.

5.1.3. Avanzar/Retroceder párrafo

Al presionar el botón **Abajo**, la reproducción avanza al siguiente párrafo. Si no hay más párrafos, se indica al usuario mediante una señal auditiva.

Al presionar el botón **Arriba**, la reproducción retrocede al párrafo anterior. Si estás leyendo el primer párrafo y intentas retroceder, se repite el primer párrafo nuevamente.

5.2. Volver a capturar una imagen

La lectura dinámica está diseñada para permitir la captura de una nueva imagen sin necesidad de regresar al **Menú Principal**. Al presionar el botón **L2** o **R2** durante la lectura dinámica, se activa nuevamente la cámara utilizada para tomar una nueva fotografía.

5.3. Opciones disponibles - Lectura dinámica con cámara interna y externa

Para acceder a las opciones disponibles durante la lectura dinámica, presiona el botón Y (consulta "2.4.3. Botón Y"). En las siguientes secciones, se detallan las opciones disponibles para la lectura

5.3.1. Guardar documento

Permite guardar el documento como un archivo *procer* en la **Biblioteca**. Al activar esta opción, se te solicitará que selecciones una carpeta de destino (consulta "2.4.9. Seleccionar carpeta de destino"). Después de seleccionar la carpeta de destino, selecciona una forma para escribir el nombre del documento (consulta "2.4.8. Escribir nombres"). Una vez ingresado un nombre, el documento se guardará en la **Biblioteca**, en la carpeta seleccionada y con el nombre ingresado.

5.3.2. Exportar

Las opciones de exportar están compuestas por tres sub opciones que se detallan a continuación:

• Exportar página a documento de *Word*. Exporta la página actual a un documento de *Word*.

- Exportar página a *pdf*. Exporta la página actual a un archivo *pdf*.
- Exportar página a audio. Exporta la página actual a un archivo de audio wav.

5.3.3. Leer tablas

Esta opción permite al usuario leer las tablas detectadas durante el procesamiento *OCR*. La detección de tablas funciona al leer desde el escáner, las cámaras, archivos de imagen o al procesar archivos *pdf*. También se puede acceder a las tablas si el contenido de la lectura se guardó en el formato *procer*.

Nota. Es necesario que el procesamiento *OCR* en línea esté activado y que el dispositivo esté vinculado a un usuario.

Los detalles sobre la lectura y navegación de tablas se explican en la sección "6. Leer tablas"

5.4. Abandonar lectura dinámica

Para abandonar la Lectura Dinámica, presiona el botón M.



6. Leer tablas

La función Leer Tablas permite al usuario leer las tablas detectadas durante el procesamiento *OCR* o al abrir un archivo de formato *procer* con tablas guardadas. Accede a esta función desde las opciones de lectura (ver "2.4.3. Botón Y"). Si no se encuentran tablas, se informa al usuario. De lo contrario, utiliza las teclas **Abajo** y **Arriba** para seleccionar las tablas detectadas.

6.1. Navegación y lectura de tablas

Las tablas se componen de filas, columnas y celdas, cada una con una coordenada que incluye el número de fila y columna. Cada celda puede contener contenido o estar vacía.

Los botones disponibles para la navegación son:

- Botón Derecha. Se desplaza a la celda o columna de la derecha (ver tipos de navegación en "6.2. Opciones de lectura de tablas").
- Botón Izquierda. Se desplaza a la celda o columna de la izquierda (ver tipos de navegación en "6.2. Opciones de lectura de tablas").
- Botón Abajo. Se desplaza a la celda o fila de abajo (ver tipos de navegación en "6.2. Opciones de lectura de tablas").
- Botón Arriba. Se desplaza a la celda o fila de arriba (ver tipos de navegación en "6.2. Opciones de lectura de tablas").
- Botón R1. Regresa a la celda correspondiente a la primera fila de la columna actual.
- Botón L1. Lee la columna actual completa.

6.2. Opciones de lectura de tablas

Presionar el botón Y durante la navegación y lectura de tablas, para acceder a las opciones disponibles (ver "2.4.3. Botón Y"). Puedes modificar el comportamiento y la cantidad de información que el dispositivo lee durante la navegación de tablas con las siguientes opciones:

- Leer nombre de la columna (primer celda de cada columna).
 - o Leer. Lee el contenido de la primera celda de la columna cada vez que cambias de posición.
 - o **No leer**. Omite la primera celda de la columna cuando cambias de posición.
- Leer nombre de la fila (primer celda de cada fila).
 - o **Leer**. Lee el contenido de la primera celda de la fila cada vez que cambias de posición.
 - o **No leer**. Omite la primera celda de la fila cuando cambias de posición.
- · Leer coordenada de columna.
 - o Leer. Lee la coordenada de la columna cada vez que te mueves de posición.
 - o **No leer**. Omite la coordenada de la columna cada vez que te mueves de posición.



- Leer coordenadas de fila.
 - o Leer. Lee la coordenada de la fila cada vez que te mueves de posición.
 - o No leer. Omite la coordenada de la fila cada vez que te mueves de posición.
- Tipo de navegación vertical (botones **Abajo** y **Arriba**).
 - o **Celda**. Navega por celdas y lee solo el contenido de la celda.
 - o Fila. Navega por filas y lee el contenido de la fila completa.
- Tipo de navegación horizontal (botones **Derecha** e **Izquierda**).
 - o **Celda**. Navega por celdas y lee solo el contenido de la celda.
 - o Columna. Navega por columnas y lee el contenido de la columna completa.

7. Reproductor de audios y listas

Utiliza el reproductor de audio de **PROCER 4 AI** para crear listas de reproducción de archivos de audio en formatos de audio *wαν*, *mp3*, *wmα*, *flαc*, *mp4*, *m4α* y *ogg*.

Recuerda que el reproductor siempre crea listas de reproducción, incluso si estás reproduciendo un solo archivo.

Guarda tus listas de reproducción en archivos de formato *procerlist* en la **Biblioteca** de **PROCER 4 AI** (ver "2.4.7. Formato procerlist").

Accede al reproductor de audio de varias formas: abre un archivo *procerlist* desde la **Biblioteca**, o abre uno o varios archivos de audio desde la **Biblioteca**, un dispositivo externo *USB* o el almacenamiento en la nube.

7.1. Navegación y controles de reproducción

7.1.1. Pausar/Reproducir

Pausa o reanuda la reproducción con el botón B.

7.1.2. Audio siguiente/anterior

Utiliza los botones **Abajo** y **Arriba** para reproducir el siguiente o el anterior archivo de la lista, respectivamente.

7.1.3. Avanzar/Retroceder tiempo del audio actual

Avanza o retrocede 5 segundos en el audio actual con los botones **Derecha** e **Izquierda**.

7.1.4. Agregar/Quitar marcas de tiempo

Agrega o quita marcas de tiempo, para cada audio que componga la lista, al presionar el botón X o mantenerlo presionado, respectivamente.

7.1.5. Desplazamiento entre marcas de tiempo

Desplázate entre las marcas de tiempo al presionar los botones L1 y R1.

7.2. Opciones disponibles - Reproductor de audios

Presiona el botón Y y accede a las opciones disponibles durante la reproducción de una lista (ver "2.4.3. Botón Y"). En las siguientes secciones se detallan las opciones disponibles:

- Guardar lista de reproducción. Guarda la lista de reproducción actual como un archivo *procerlist* en la Biblioteca. Activa esta opción y elige una carpeta de destino (ver "2.4.9. Seleccionar carpeta de destino"). Luego, escribe un nombre para el archivo (ver "2.4.8. Escribir nombres"). Una vez hecho, la lista se guardará en la Biblioteca, en la carpeta seleccionada y con el nombre ingresado. Esta opción solo está disponible si la lista de reproducción actual no está guardada.
- Agregar audio desde Biblioteca. Agrega un audio desde la Biblioteca de PROCER 4 AI a la lista actual (ver "3.3. Explorar Biblioteca").
- Agregar audio desde puerto *USB*. Añade un audio desde el almacenamiento externo *USB* a la lista actual (ver "3.5.1. Navegación *USB*. Abrir archivos desde puerto *USB*").

- Agregar audio desde *Dropbox*®. Incorpora un audio desde *Dropbox*® (ver "3.5.3. Navegación *Dropbox*®. Abrir archivos desde *Dropbox*®").
- Agregar audio desde *Google Drive*®. Incorpora un audio *Google Drive*® (ver "3.5.2. Navegación *Google Drive*®. Abrir archivos desde *Google Drive*®").
- Mover audio a otra posición. Cambia la posición del audio que se está reproduciendo actualmente en la lista. Utiliza los botones Abajo y Arriba para seleccionar la nueva posición, y confirma con el botón B.
- Borrar marcas de tiempo. Elimina todas las marcas de tiempo del audio actual.
- Información. Obtén información sobre la lista actual, incluyendo el nombre (si lo tiene), posición actual en la lista, total de audios disponibles, nombre del audio actual y tiempo de reproducción.
- Borrar audio. Elimina el audio actual de la lista de reproducción, pero no el archivo original, solo su referencia en la lista.

Nota. Al guardar una lista de reproducción, los archivos que se abrieron desde el almacenamiento externo *USB* o desde la nube se copian a la **Biblioteca** en la carpeta AUDIOS.

7.3. Abandonar reproducción

Si presionas el botón A durante la reproducción, PROCER 4 AI te pedirá confirmación para abandonar (ver "2.4.4. Responder preguntas/Confirmar acciones").

Realiza una presión del botón M para volver al Menú Principal sin necesidad de confirmación.



8. Lectura de libros Daisy

Este dispositivo puede reproducir libros Daisy 2.02 y Daisy 3.

Un libro *Daisy* consta de varios archivos en una carpeta. Cuando navegues por la **Biblioteca**, un *USB* externo o almacenamiento en la nube, **PROCER 4 AI** emitirá un sonido diferente para identificar una carpeta como un libro *Daisy*. Presiona el botón **B** sobre una carpeta con un libro *Daisy* para comenzar la lectura.

Si encuentras un archivo *zip* que contenga un libro *Daisy*, presiona el botón **B** para descomprimirlo en la carpeta *DAISY* de la **Biblioteca** y leerlo.

8.1. Navegación del libro Daisy durante la lectura

Durante la lectura del libro *Daisy*, puedes encontrar que algunos controles o características no están disponibles, dependiendo de cómo estén construidos. Aquí tienes los controles disponibles durante la lectura:

8.1.1. Pausar/Reproducir

Pausa o reanuda la reproducción con una presión del botón B.

8.1.2. Avanzar/Retroceder frase

Avanza a la siguiente frase con una presión del botón **Derecha**, y retrocede a la frase anterior con una presión del botón **Izquier-da**. Si estás en la última frase y avanzas hacia adelante, continuarás con el siguiente capítulo.

8.1.3. Avanzar/Retroceder párrafo (sólo versiones Daisy 2.02)

En versiones *Daisy 2.02*, avanza al siguiente párrafo con una presión del botón **Abajo** y retrocede al párrafo anterior con una presión del botón **Arriba**. Si estás en el último párrafo y avanzas hacia adelante, continuarás con el siguiente capítulo.

8.1.4. Cambiar capítulo/página

Cambia al siguiente capítulo/página presionando el botón R1, y al capítulo/página anterior con el botón L1.

8.2. Opciones disponibles - Lectura de libros Daisy

Para acceder a las opciones disponibles durante la lectura de un libro *Dαisy*, presiona el botón **Y** (ver "2.4.3. Botón Y").

8.2.1. Ir a página o marcas

Elige el capítulo o página deseada del libro Daisy utilizando los botones Abajo y Arriba.

8.2.2. Navegación por páginas/Navegación por capítulos

Modifica el comportamiento de la presión larga del botón **Abajo** y **Arriba** para cambiar entre navegación por páginas o por capítulos, según tu preferencia. Esta opción está disponible según la construcción del libro *Daisy*.

8.2.3. Reproducir/No reproducir elementos opcionales (solo libros *Daisy* 2.02)

Activa o desactiva la reproducción de elementos opcionales en libros *Daisy 2.02*. Estos elementos vienen desactivados por defecto y puedes modificarlos según tu preferencia y la construcción del libro.



8.2.4. Información

Obtén información detallada sobre el libro Daisy actual presionando esta opción.

8.3. Abandonar lectura de libros *Daisy*

Cuando estés leyendo un libro *Daisy* y desees abandonar la lectura, presiona el botón **A**. **PROCER 4 AI** te pedirá confirmación para asegurarse de que deseas salir (ver "2.4.4. Responder preguntas/Confirmar acciones").

Si deseas salir de inmediato sin confirmación, presioná el botón **M** y volverás al **Menú Principal**.

9. Manipular archivos procer

Para manipular ciertas características de archivos *procer* (ver "2.4.6. Formato procer"), selecciona la opción **Manipular archivo** desde la **Biblioteca** (ver "3.3.1. Navegación de la Biblioteca"). Una vez dentro, usa los botones **Abajo** y **Arriba** para moverte entre las páginas del archivo seleccionado. Utiliza los botones **Izquierda** y **Derecha** para desplazarte entre las páginas marcadas. Cuando estés en la página deseada, presiona el botón **B** para que **PROCER 4 AI** comience la lectura desde ese punto.

9.1. Opciones disponibles - Manipular archivos procer

Cuando estés en Manipular archivos, presiona el botón Y para acceder a las funciones disponibles. Estas son:

9.1.1. Exportar página

Las opciones de Exportar página están compuestas por tres sub opciones:

- Exportar página a documento de Word. Exporta la página actual a un documento de Word.
- Exportar página a pdf. Exporta la página actual a un archivo pdf.
- Exportar página a audio. Exporta la página actual a un archivo de audio wαν.

9.1.2. Exportar documento

Las opciones de **Exportar documento** están compuestas por cuatro sub opciones:

- Exportar documento a Word. Exporta el documento actual (todas las páginas) a un documento de Word.
- Exportar documento a pdf. Exporta el documento actual (todas las páginas) a un archivo pdf.
- Exportar documento a audio. Exporta el documento actual (todas las páginas) a archivos de audio wav. Este procedimiento puede tardar mucho tiempo, dependiendo de la cantidad de páginas del documento. Puede cancelarse si el usuario lo desea.
- Exportar documento a formato procer. Exporta el archivo procer completo.

9.1.3. Invertir páginas

Invierte el orden de las páginas del archivo procer.

9.1.4. Combinar documento

Combina dos archivos *procer*, agregando las páginas del archivo actual al final del archivo de destino. (ver "3.3. Explorar Biblioteca").

9.1.5. Desmarcar todas las página

Quita todas las marcas de las páginas del documento.

9.1.6. Borrar nombre a todas las páginas

Elimina el nombre de todas las páginas del documento.



9.1.8. Borrar registros para reanudar lectura

Reinicia el progreso de la lectura para que empiece desde el principio del documento.

9.1.9. Eliminar página

Borra la página seleccionada del archivo procer.

ANEXO I Atajos del teclado externo



Anexo I. Atajos del teclado externo

A continuación, te presentamos las diferentes combinaciones de teclas:

Al.1. Navegación

Flecha Derecha. Siguiente carácter.

Flecha Izquierda. Carácter anterior.

Flecha Abajo. Reproduce frase escrita.

Flecha Arriba. Reproduce frase escrita.

Control + flecha Derecha. Siguiente palabra.

Control + flecha Izquierda. Palabra anterior.

Fin. Ir al final de la línea actual.

Inicio. Ir al principio de la línea actual.

Control. Detiene la reproducción auditiva de la frase actual

Al.2. Edición

Shift + flecha Derecha. Selecciona el siguiente carácter.

Shift + flecha izquierda. Selecciona el carácter anterior.

Shift + Fin. Selecciona hasta el final de la línea actual.

Shift + Inicio. Selecciona hasta el inicio de la línea actual.

Shift + Control + flecha Derecha. Selecciona le siguiente palabra.

Shift + Control + flecha Izquierda. Selecciona palabra anterior.

Control + Z. Deshacer.

Control + Shift + Z. Rehacer.

AI.3. Funciones

CapsLock o Bloqueo de Mayúsculas. Activa/desactiva las mayúsculas.

Enter. Confirma el nombre.

ANEXO II Combinaciones de teclas Editor de texto



Anexo II. Combinaciones de teclas - Editor de texto

A continuación, se listan las diferentes combinaciones de teclas.

All.1. Navegación

Flecha Derecha. Se desplaza al siguiente caracter y lo reproduce.

Flecha Izquierda. Se desplaza al carácter anterior y lo reproduce.

Flecha Abajo. Se desplaza a la misma posición de la siguiente línea y la reproduce.

Flecha Arriba. Se desplaza a la misma posición de la línea anterior y la reproduce.

Control + flecha Derecha. Se desplaza al incio de la siguiente palabra y la reproduce.

Control + flecha Izquierda. Se desplaza al incio de la palabra anterior y la reproduce.

Control + flecha Arriba. Se desplaza al inicio del párrafo o bloque anterior y lo reproduce.

Control + flecha Abajo. Se desplaza al inicio siguiente párrafo o bloque y lo reproduce.

Fin. Va al final de la línea actual.

Inicio. Va al principio de la línea actual.

Control. Detiene la reproducción auditiva actual.

Control + Inicio. Va al inicio del documento.

Control + Fin. Va al final del documento

Insert + flecha Abajo. Reproduce desde la posición actual hasta el final del documento.

Insert + flecha Arriba. Reproduce la línea actual.

AII.2. Edición

Shift + flecha Derecha. Selecciona/deselecciona el siguiente carácter.

Shift + flecha izquierda. Selecciona/deselecciona el carácter anterior.

Shift + flecha Arriba. Selecciona/deselecciona desde la posición actual hasta la misma posición de la línea anterior.

Shift + flecha Abajo. Selecciona/deselecciona desde la posición actual hasta la misma posición de la línea siguiente.

Shift + Control + flecha Derecha. Selecciona/deselecciona la siguiente palabra.

Shift + Control + flecha Izquierda. Selecciona/deselecciona la palabra anterior.

Shift + Control + flecha Arriba. Selecciona/deselecciona desde la posición actual hasta el inicio del bloque actual o anterior.



Shift + Control + flecha Abajo. Selecciona/deselecciona desde la posición actual hasta el fin del bloque actual o siguiente.

Shift + Fin. Selecciona/deselecciona desde la posición actual hasta el final de la línea actual.

Shift + Inicio. Selecciona/deselecciona desde la posición actual hasta el inicio de la línea actual.

Shift + Control + Inicio. Selecciona/deselecciona desde la posición actual hasta el inicio del documento.

Shift + Control + Fin. Selecciona/deselecciona desde la posición actual hasta el final del documento

Control + Z. Deshacer.

Control + Shift + Z. Rehacer.

Control + A. Selecciona todo.

Control + C. Copia el texto seleccionado.

Control + X. Corta el texto seleccionado.

Control + V. Pega el texto seleccionado.

Insert + *Shift* + *flecha Arriba*. Reproduce el texto seleccionado.

Control + *Enter*. Inserta una nueva página a continuación de la actual con el texto existente de la posición del cursor hasta el final del documento.

All.3. Funciones

CapsLock o Bloqueo de Mayúsculas. Activa/desactiva mayúsculas.

NumLock o Bloque de teclado Numérico. Activa/desactiva el teclado numérico.

Insert + S. Activa/desactiva la reproducción auditiva del editor de texto.

Insert + 2. Activa/desactiva la verbalización de caracteres al escribir.

Insert + 3. Activa/desactiva la verbalización de la palabra escrita al presionar espacio.

Control + Página abajo. Cambia a la página siguiente.

Control + Página arriba. Cambia a la página anterior.

Control + N. Inserta una nueva página vacía a continuación de la actual.

Control + Símbolo suma. Aumenta el tamaño de la letra.

Control + Símbolo resta o guion medio. Reduce el tamaño de la letra.

Control + M. Activa/desactiva mostrar todas las letras en mayúsculas.

Control + F. Modifica la tipografía de la letra.

All.4. Dictado por voz

El **Editor de texto** de **PROCER 4 AI** permite escribir mediante el dictado por voz. Una vez iniciado el dictado, no se puede escribir con el teclado ni utilizar el resto de los controles hasta que el dictado finalice. La cámara debe encontrarse conectada.

Los siguientesbotones se utilizan para el dictado por voz:

- o Botón L2/R2. Inicia/finaliza el dictado por voz.
- o Botón A. Finaliza el dictado por voz si este está siendo utilizado.

AII.4.1. Conversión de símbolos

Si la conversión de símbolos está activada, los signos que se pueden dictar al editor de texto son:

- o Guion/Guion medio.
- o Dos puntos.
- o Punto y coma.
- o Punto y aparte.
- o Punto/Punto seguido.
- o Coma.
- o Nueva línea/Salto de línea.
- o Abrir/Cerrar paréntesis.
- o Abrir/Cerrar comillas.
- o Abrir/Cerrar signo de exclamación/Admiración.
- o Abrir/Cerrar signo de pregunta/Interrogación.

ANEXO III Usuario y aplicaciones



Anexo III. Usuario y aplicaciones

Aprovecha al máximo las características y funciones que ofrece **PROCER 4 AI** con una cuenta de usuario vinculada que viene con los dispositivos. No necesitas crear ni vincular una cuenta.

Para ingresar a su cuenta, accede a nuestro sitio web: htttps://www.procertecnologias.com

Identifica el usuario y la contraseña de tu dispositivo. Encuentra esta información en un lateral de la caja de **PROCER 3 AI**. También puedes solicitarnos esta información por los medios de comunicación habituales.

Nota. Cambia la contraseña según tu preferencia.



AIII.1. Iniciar Sesión con cuenta de PROCER

Acceder a tu cuenta desde la sección *Login* de nuestra *web*.

→ Login
Email / Nombre de usuario
Contraseña
¿Olvidaste tu contraseña? Recuperar cuenta
Login

Después de ingresar el nombre de usuario y la contraseña, accede al **Panel de Usuario** presionando el botón **Login**. Si los datos ingresados son válidos, aparecerá la pantalla para completar tu perfil de usuario. Aquí, podrás ingresar tu nombre, apellido, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento y sexo.





Una vez confirmados los datos de tu perfil, ya podrás utilizar el **Panel de Control** del sitio *web*, donde encontrarás disponibles las siguientes secciones:

- Perfil.
- · Mis dispositivos.
- · Aplicaciones.
- Wifi: Generar QR.
- Vincular dispositivo con código QR.
- Cambio de contraseña.

A continuación, se describe como utilizar las principales secciones del Panel de Control.

AIII.2. Sección Mis Dispositivos

En la sección **Mis Dispositivos** del **Panel de Control** del usuario en la *web*, podrás visualizar los dispositivos vinculados. Desde aquí, tendrás la opción de desvincular los dispositivos que no desees.







Aquí, al presionar el botón **Configurar**, se pueden realizar ajustes sobre su dispositivo.

Puedes configurar la lista de funciones del **Menú Principal**, modificar el orden arrastrando la función a la posición deseada y activar o desactivar las funciones marcando o desmarcando la casilla correspondiente. También puedes asignar funciones a los atajos del **Menú Principal** mediante la configuración de los botones disponibles.

Además, puedes realizar ciertos ajustes del dispositivo desde esta sección.

AIII.3. Aplicaciones

PROCER 4 Al también te permite acceder a servicios de almacenamiento en la nube, como *Google Drive*® o *Dropbox*®. Ambos servicios requieren autorización por parte del usuario. Para otorgar dicha autorización, accede a la sección de Aplicaciones desde el Panel de Control del usuario en la web.









AIII.3.1. Vincular cuenta con Google Drive®

Para vincular tu cuenta de usuario a *Google Drive*® y poder usarlo desde **PROCER 4 AI**, presiona el botón **Vincular a** *Google Drive*®.






A continuación, selecciona la cuenta de Google® que otorgará el permiso para acceder a Google Drive® Google Drive®.



Una vez seleccionada la cuenta de *Google*®, en la pantalla siguiente se describen los permisos que se solicitan. Presiona **Continuar** para obtener el acceso a *Google Drive*®.

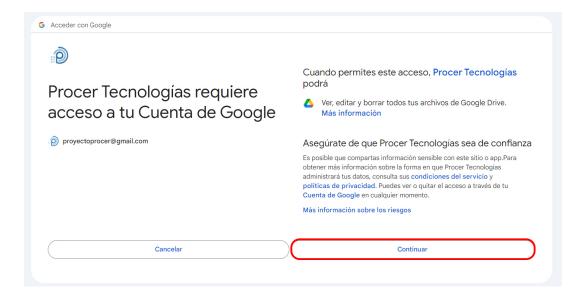



Una vez que hayas otorgado acceso al servicio, volverás automáticamente a la sección de **Aplicaciones** del **Panel de Control**, donde verás que el servicio de *Google Drive*® ahora está habilitado. A partir de este momento, podrás acceder a *Google Drive*® en todos los dispositivos vinculados.







AIII.3.2. Vincular cuenta con *Dropbox*®

Para vincular la cuenta de usuario a *Dropbox*® y poder usarlo desde **PROCER 4 AI**, debes presionar el botón **Vincular** del cuadro correspondiente a *Dropbox*®.







A continuación, es posible que uno deba acceder a su cuenta de *Dropbox*® para brindar el permiso de acceso, similar al proceso realizado para *Google Drive*®.





Inicia sesión o regístrate en Dropbox para vincular ProcerDBX



Una vez que hayas brindado el acceso al servicio, serás redirigido automáticamente a la sección **Aplicaciones** del **Panel de Control**, donde podrás ver que el servicio de *Dropbox*® ya está habilitado. A partir de este momento, podrás acceder a *Dropbox*® en todos los dispositivos vinculados.







Desde esta misma sección, tienes la opción de desvincular las aplicaciones si así lo deseas.









www.procertecnologias.com info@procertecnologias.com +549 351 4213816







